



LOCATION AEROSOL MANOSONIQUE
Ref : LOC AERO MANO

Description

L'appareil combine trois fonctions :

- production d'un aérosol
- émission de vibrations à 100 Hz
- application temporaire d'une surpression réglable

Ces trois fonctions, qui sont synchronisées automatiquement avec la déglutition du patient, permettent la pénétration du sérum physiologique dans la trompe d'Eustache (trompe auditive).

La durée optimale d'une séance est de 8 minutes en deux phases :

- première phase de deux minutes avec vibrations seules (détersion de la muqueuse nasale puis mouchage)
- deuxième phase de 6 minutes avec surpression temporaire (15 déglutitions espacées d'au moins 30 secondes)

Cet appareil d'aérosol est à associer aux **nébuliseurs ATOMISOR® MS1A/E.**