


GUIDE UTILISATION DES LITS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- ▶ Le lit ne doit pas être manipulé par des enfants ou par des personnes confuses ou désorientées.
- ▶ Le lit doit être branché sur une prise dédiée, conforme aux normes en vigueur. Dans le cas où l'utilisation d'un adaptateur, d'une rallonge ou d'une prise multiple s'avère indispensable, il est nécessaire de s'assurer que ses caractéristiques sont adaptées à celle du dispositif.
- ▶ Pour éviter tout risque liée à l'utilisation de la hauteur variable, ne pas placer le lit sous une fenêtre et tenir compte de la longueur de la potence.
- ▶ Nettoyer régulièrement le lit et ses accessoires à l'aide d'une lingette imprégnée d'un produit détergent-désinfectant pour matériel médical.
- ▶ La fiche d'alimentation secteur doit être débranchée avant tout déplacement du lit. Pendant le déplacement, le câble ne doit pas être en contact avec le sol et les roulettes. Ne pas tirer sur le câble secteur pour débrancher la fiche de prise de courant.
- ▶ Lors de toute manipulation, veiller à ne pas pincer les cordons électriques des moteurs et de la télécommande et à ne pas faire de nœuds.
- ▶ L'état des câbles doit être vérifié régulièrement. Si la moindre altération est constatée et pour toute intervention technique, contacter la personne en charge de l'entretien du lit.
- ▶ Le frein qui équipe les roues doit être bloqué lorsque le lit n'a pas besoin d'être déplacé. S'assurer du blocage en essayant de déplacer le lit latéralement.
- ▶ Un mauvais positionnement de la barrière peut être préjudiciable à la sécurité ou provoquer un dysfonctionnement.
- ▶ Après chaque utilisation et pendant le repos de la personne alitée, il est préférable de mettre le lit en position basse afin de réduire la gravité d'une chute éventuelle.
- ▶ Ne pas s'asseoir sur le côté du relèvement buste ou du relèvement jambes si ce dernier n'est pas à plat.

BARRIÈRES 3/4 MÉTAL

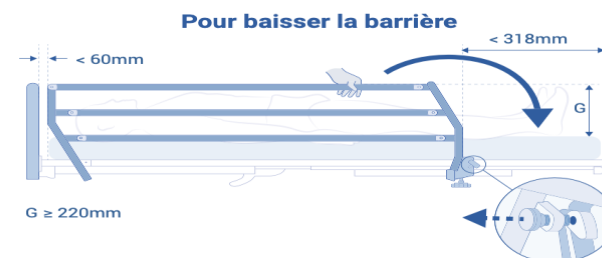


Barrière 3/4 et son obturateur d'espace pour constituer une pleine longueur



Réaliser une évaluation des risques représentés par l'ensemble «Lit-accessoires-matelas» en regard des besoins de la personne soignée et des soignants.

TÉLÉCOMMANDE

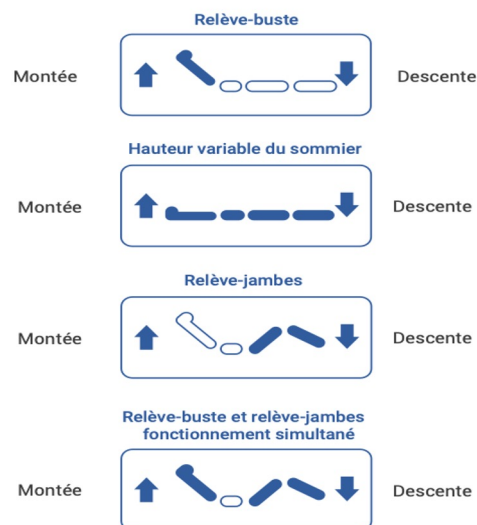


SYSTÈME DE VERROUILLAGE MÉCANIQUE


Clé en position verticale : La fonction est déverrouillée

Tourner la clé légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller la fonction

Clé pour verrouiller une fonction

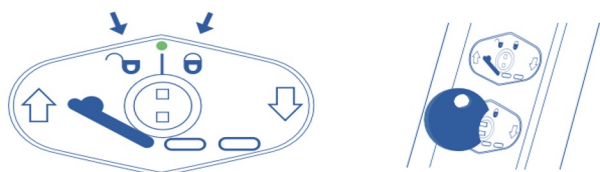

SYSTÈME DE VERROUILLAGE MAGNÉTIQUE

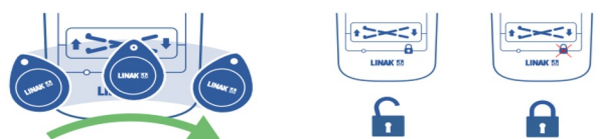

LA POTENCE

- ▶ La potence est une aide au patient en position allongée pour se remonter ou se redresser seul dans le lit.
- ▶ Elle n'est pas prévue pour l'aide au transfert.



FREINS

Les roues doivent être bloquées pour éviter les risques de chute en cas d'appui sur le lit. S'assurer du blocage des roues en essayant de déplacer le lit.

